



### **Arbeitsanweisung zu aquaPROdentis FLOW-Neo mit aquaPROdes für FLOW**

Nach erfolgter Montage der Sicherungseinrichtung und des Vorlagebehälter ist dieser mit dem Desinfektionsmittel aquaPROdes für Flow zu befüllen. Beim Befüllen ist kein Sicherheitsabstand zum Einfüllstutzen zu beachten!

Die Sicherungseinrichtung Flow-Neo führt bei jedem Einschalten des Stroms (über Praxishauptschalter oder Geräteschalter) eine Zwangsentleerung des Vorlagebehälters durch. Dabei strömt Wasser aus dem transparenten Plastikschlauch an der Geräterückseite aus. Mit jedem Befüllvorgang des Vorlagebehälters wird das Desinfektionsmittel aquaPROdes für FLOW (Art. Nr. 75 222 250) über die im Gerät befindliche Schlauchpumpe dosiert. Eine regelmäßige Kontrolle (alle 2 Wochen) des Füllstands des Desinfektionsmittels im Glasbehälter an der Geräteaußenseite wird vorgegeben.

Eine regelmäßige Überprüfung der Sicherungseinrichtung nebst Dosieranlage wird halbjährlich gefordert. Damit soll eine Über-/ Unterdosierung ausgeschlossen werden. Ebenso wird der Zulauf in die Sicherungseinrichtung kontrolliert und ggf. instand gesetzt.

#### **wichtige Zeitintervalle:**

**täglich:** jeden Morgen, mit der Speischale beginnend, diese solange betätigen bis der „Daumentest“ am Auslass der Speischalenspülung konstant kaltes Wasser bringt. Erst damit ist sichergestellt, dass frisches Wasser an der Behandlungseinheit angekommen ist. Anschließend 3 x den Mundglasfüller, anschließend die Wasserverbraucher (Bohrinstrumente, Spritzen und Zahnsteinentfernung) 1 Minute betätigen.

**14 tägig:** Kontrolle des Füllstands des Desinfektionsmittels

**halbjährlich:** Wartung der Sicherungseinrichtung nebst Dosieranlage

#### **Reg. Nr.: N-80949**

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter 0 62 68 – 92 92 77 zur Verfügung.

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden!  
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!**