



Arbeitsanweisung zu aquaPROdentis FLOW mit aquaPROdes für FLOW

Nach erfolgter Montage der Sicherungseinrichtung und des Vorlagebehälter ist dieser mit dem Desinfektionsmittel aquaPROdes für Flow zu befüllen. Beim Befüllen ist kein Sicherheitsabstand zum Einfüllstutzen zu beachten!

Nach jedem Befüllen ist die Q-Taste auf dem Bedienelement bis zum Aufleuchten der 2. Diode „Membranfilter wechseln – Desinfektionsmittel nachfüllen“ zu drücken.

Die Sicherungseinrichtung Flow führt bei jedem Einschalten des Stroms (über Praxishauptschalter oder Geräteschalter) eine Zwangsentleerung des Vorlagebehälters durch. Dabei strömt Wasser aus dem transparenten Plastikschlauch an der Geräterückseite aus. Mit jedem Befüllvorgang dieses Vorlagebehälters wird das Desinfektionsmittel aquaPROdes für FLOW (Art. Nr. 75 222 250) über die im Gerät befindliche Schlauch-pumpe dosiert. Eine regelmäßige Kontrolle (alle 2 Wochen) des Füllstands des Desinfektionsmittels im Glasbehälter an der Geräteaußenseite wird vorgegeben.

Eine regelmäßige Überprüfung der Sicherungseinrichtung nebst Dosieranlage wird halbjährlich gefordert. Damit soll eine Über-/ Unterdosierung ausgeschlossen werden. Ebenso wird der Zulauf in die Sicherungseinrichtung kontrolliert und ggf. instand gesetzt.

wichtige Zeitintervalle:

täglich: morgens, an jeder Dentaleinheit die Speischale 3x betätigen, anschließend 2 x den Mundglasfüller, anschließend die Wasserverbraucher (Bohrinstrumente, Spritzen und Zahnsteinentfernung) 1 Minute betätigen.

14 tägig: Kontrolle des Füllstands des Desinfektionsmittels

halbjährlich: Wartung der Sicherungseinrichtung nebst Dosieranlage

Reg. Nr.: N-80949

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter 0 62 68 – 92 92 77 zur Verfügung.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden!
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!