



Arbeitsanweisung Synchrodos-Plus mit aquaPROdes

In Ihrer Praxis wurde eine Dosieranlage Synchrodos-Plus montiert, die dem Wasser mengenproportional das Desinfektionsmittel aquaPROdes zuimpft.

Der Füllstand im Kanister ist durch einen Kontrollschlitz im Gehäuse von außen leicht erkennbar. Dieser Füllstand muss alle 14 Tage kontrolliert werden. Bitte beachten Sie dabei, dass der Füllstand nicht unter die schwarze „Minimumlinie“ geht. Zur besseren Kontrolle empfehlen wir eine Markierung (z.B. auf Leukoplaststreifen oder mit Tipp-Ex) mit Datum zu vermerken.

Die leitungstechnische Besonderheit Ihrer Praxis macht es notwendig, dass Sie über die Maßnahmen der RKI-Richtlinie hinaus Wasser aus Ihren Behandlungseinheiten ablaufen lassen. Gefordert wird hier morgens das Wasser ablaufen zu lassen, **beginnend mit der Speischalenspülung 3 Minuten, 5x Mundglasfüller und erst dann alle anderen Wasserführenden Instrumente für 1 Minute. Hierbei bitte auch Instrumente spülen, die gegebenenfalls normalerweise ohne Wasser betrieben werden (untersetztes Winkelstück, grüner Ring).**

Nur durch einen gründlichen Wasseraustausch ist gewährleistet, dass entsprechendes Desinfektionsmittel in alle Bereiche eingespült wird und wirken kann.

Wo kein Desinfektionsmittel hinkommt, kann es auch nicht wirken!

Der Wasserauslass für die Speischalenspülung und die Mundglasbefüllung muss auch wöchentlich mechanisch von innen mit einer entsprechenden Bürste und Desinfektionsmittel gereinigt werden.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter 0 62 68 – 92 92 77 jeder Zeit zur Verfügung.

Reg. Nr.: N-80948

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden!
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!**