




Einbaustrecke EBS Basic - Plus

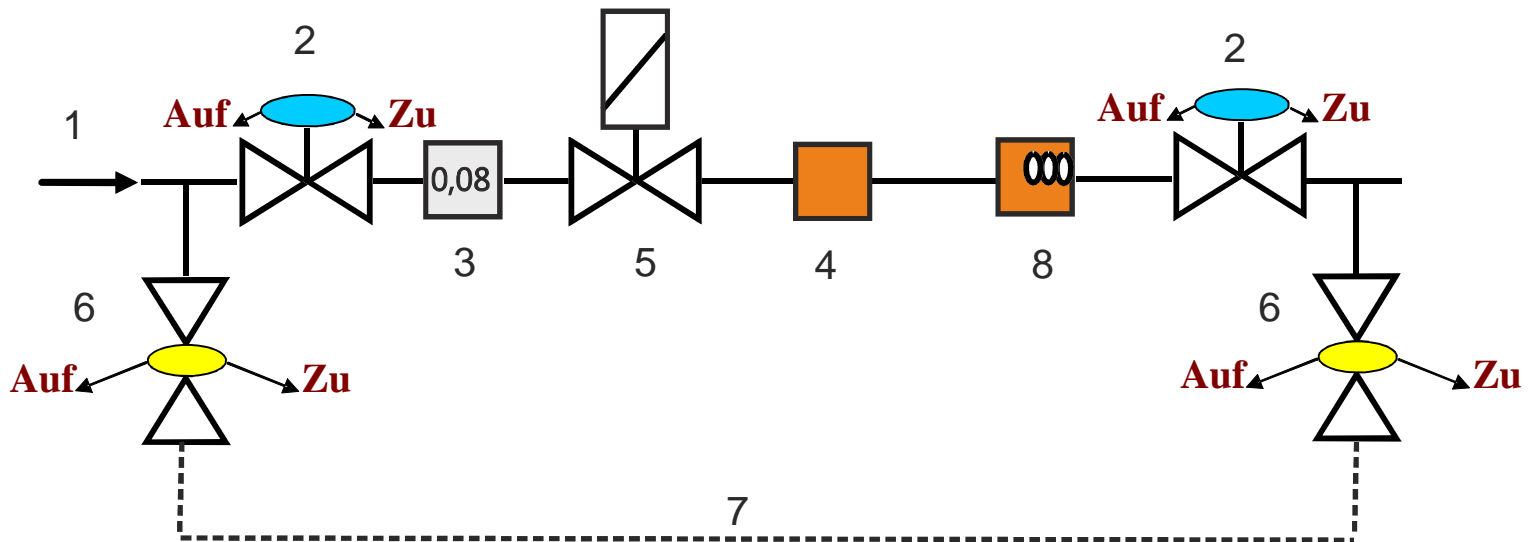

- | | |
|---|--|
| 1) Wassereingang links | 6) Absperrorgan |
| 2) Absperrorgan | 7) Flexible Umgehung |
| 3) Filter 0,08mm | 8) Kontaktwasserzähler
mit Impfstelle |
| 4) Anschlußset ASI | |
| 5) Magnetventil 230V/50Hz über
Praxishauptschalter schaltbar | |

ACHTUNG!!


In Betrieb: Alle 4 grünen Hebel waagrecht.
Außer Betrieb: Alle 4 grünen Hebel senkrecht.

Bei Rückfragen stehen wir ihnen gerne zur Verfügung

Tel: 0 62 68 / 92 92 77



Montagevoraussetzungen für EBS Basic - Plus

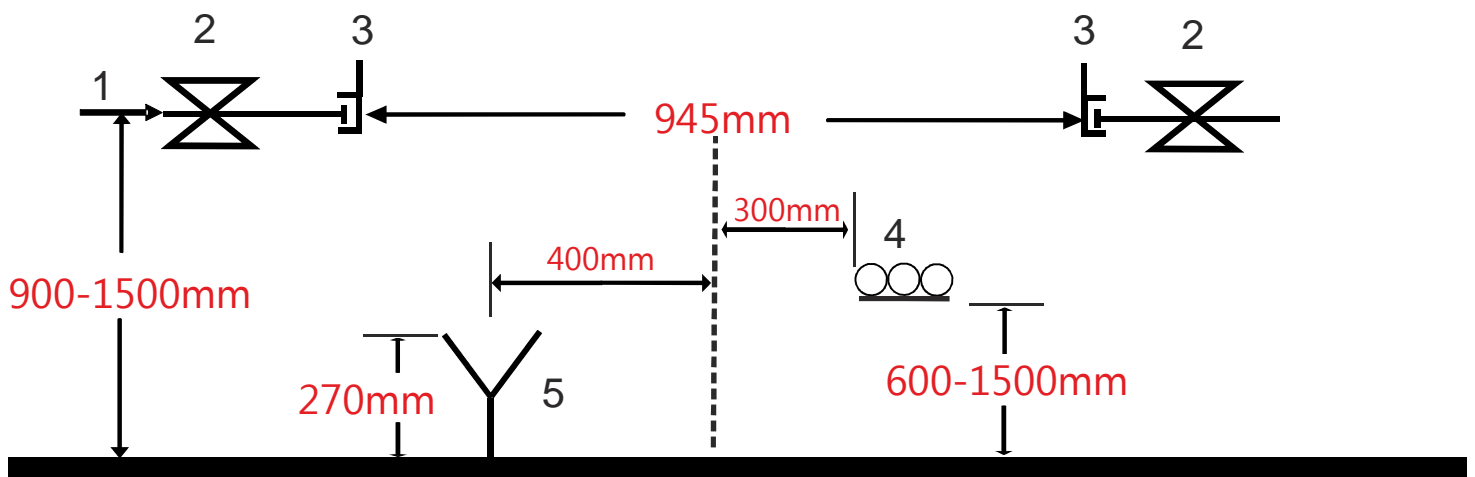

- 1) Wassereingang links
- 2) Rohrhalterung als Festpunkt
- 3) Verschraubung mit $\frac{3}{4}$ " Außengewinde
- 4) Mehrfachsteckdose 230V/50Hz über Praxishauptschalter schaltbar. mit Nachlaufrelais, 60Min. Verzögerung
- 5) Abflustrichter DN 50

- Betriebsdruck Wasserenthärtungsanlage: 2,5-8 bar -

Bei Rückfragen stehen wir ihnen gerne zur Verfügung

Tel: 0 62 68 / 92 92 77