




Einbaustrecke EBS Plus

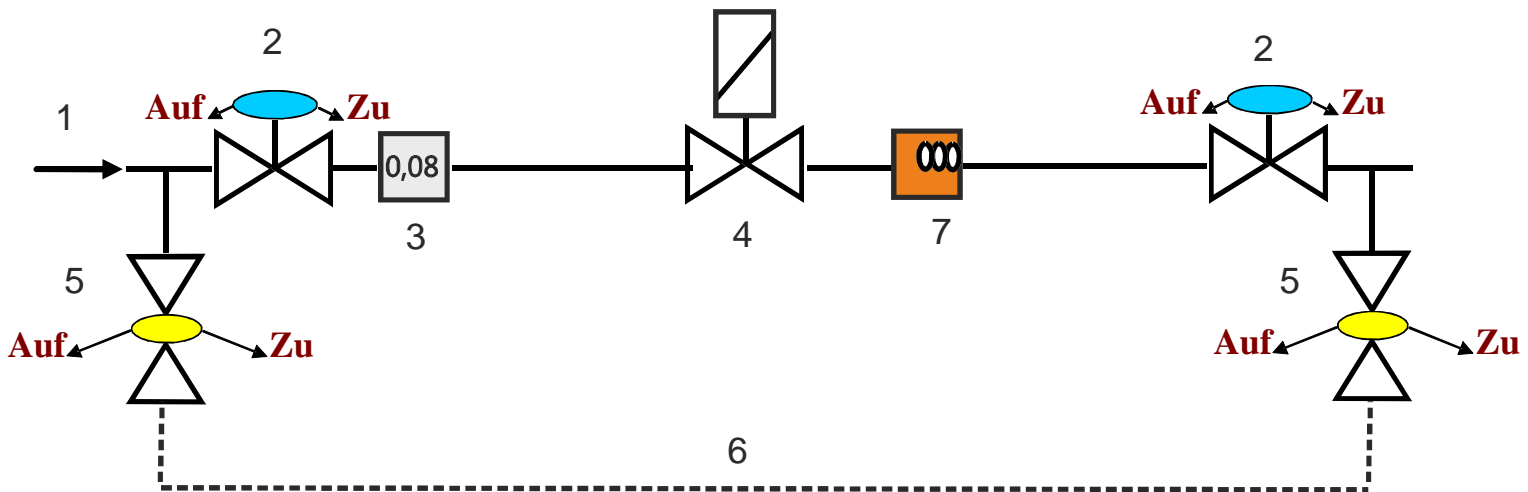

- | | |
|---|--|
| 1) Wassereingang links | 5) Absperrorgan |
| 2) Absperrorgan | 6) Flexible Umgehung |
| 3) Filter 0,08mm | 7) Kontaktwasserzähler
mit Impfstelle |
| 4) Magnetventil 230V/50Hz
über Praxishauptschalter | |

ACHTUNG!!


In Betrieb: Alle 4 grünen Hebel waagerecht.
Außer Betrieb: Alle 4 grünen Hebel senkrecht.

Bei Rückfragen stehen wir ihnen gerne zur Verfügung

Tel: 0 62 68 / 92 92 77



Montagevorassetzungen für EBS Plus

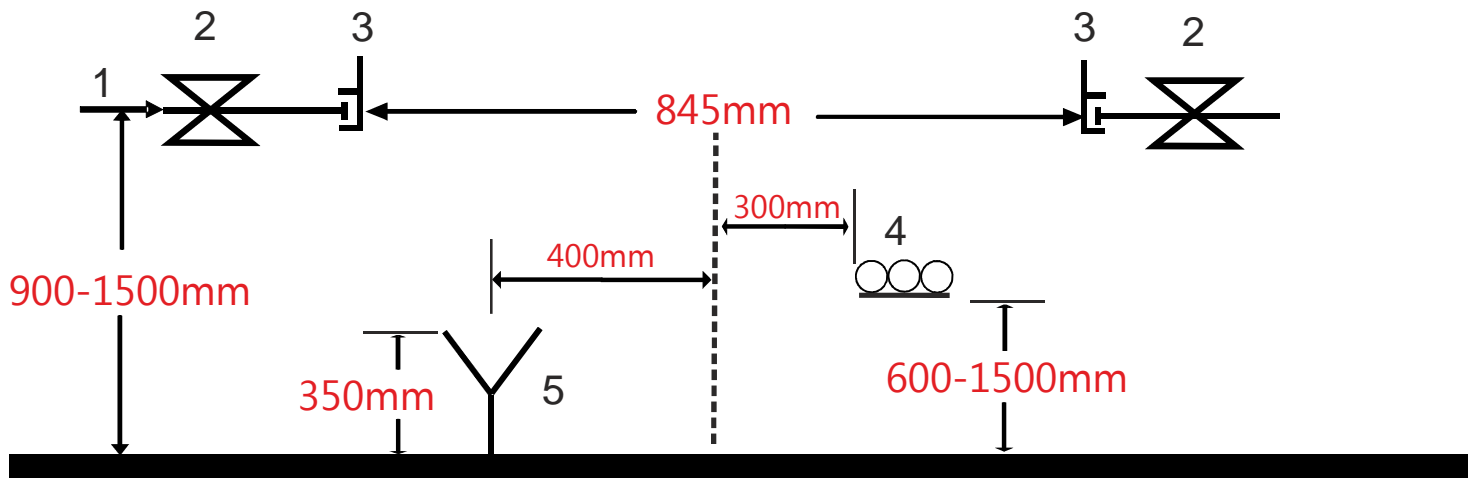

- 1) Wassereingang links
- 2) Rohrhalterung als Festpunkt
- 3) Verschraubung mit $\frac{3}{4}$ " Außengewinde

- 4) Mehrfachsteckdose 230V/50Hz über Praxishauptschalter schaltbar
- 5) Abflustrichter DN50

Bei Rückfragen stehen wir ihnen gerne zur Verfügung.

Tel: 0 62 68 / 92 92 77