

Montagevoraussetzung aquaPROdentis Flow-Neo Plus Sicherungseinrichtung AA nach EN 1717


Zum Anschluß der oben genannten Sicherungseinrichtung ist das beigefügte Anschlußset vormontiert, jedoch nicht eingedichtet!!!

Die beiden durch den flexiblen Schlauch verbundenen Bauteile dienen als Prüfarmaturen bzw.zur Montage der Sicherungseinrichtung.

Vor der Demontage des Schlauches sind die Prüfhähne abzusperren und die Verschlußkappen dicht zu verschließen.

Ein Betrieb mit flexiblem Schlauch als Umgehung der Sicherungseinrichtung entspricht nicht dem Stand der Technik. Der Monteur bzw. der Betreiber trägt dafür die Verantwortung.

Anschlussschema

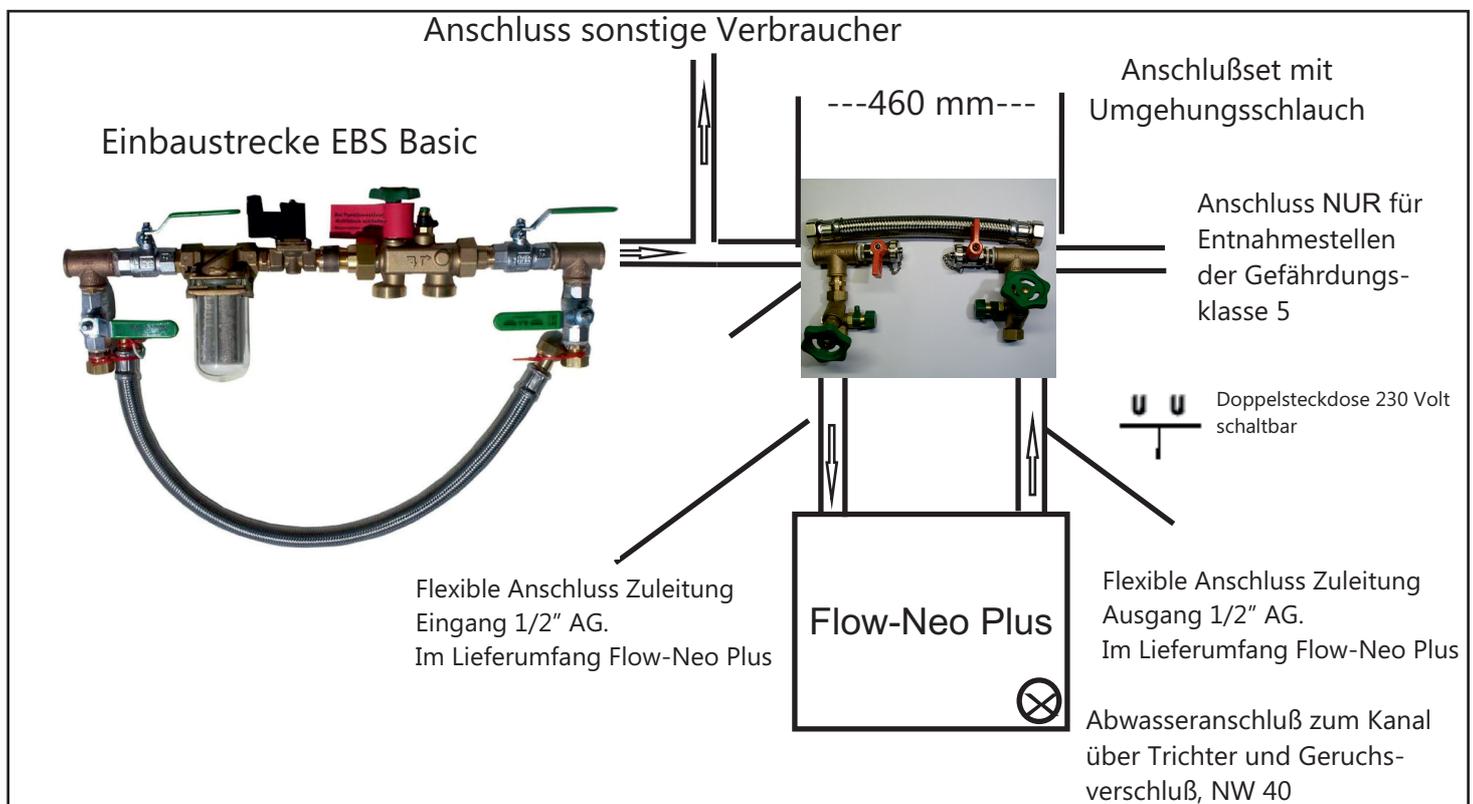

Für den ordnungsgemäßen Betrieb sowie für die Wahrung von Garantieansprüchen ist die Einhaltung der nachstehend aufgeführten Wasserparameter Voraussetzung.

Bei einer Überschreitung des Wasserhärtewertes droht Verkalkung, bei einer Unterschreitung drohen Probleme durch organische Ablagerungen.

geforderte Eingangsparameter:

Wasserhärte: 8,4 - 12° dH / 1,50 - 2,14 mmol/l

pH Wert: 7,2 - 7,8

Filtration: 0,08mm

Bitte beachten Sie einen Druckverlust durch vertikale Stranglängen. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Berechnung der entsprechenden Anlage sowie des besten Montageortes zur Verfügung.